

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre droite Arsis 1200 mm, Aluminium Epoxy Blanc
Référence	049819

Les + produit

- + Avec support douchette coulissant et tablette de douche intégrée.
- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Esthétique et design.
- + Garantie totale anticorrosion.

Description

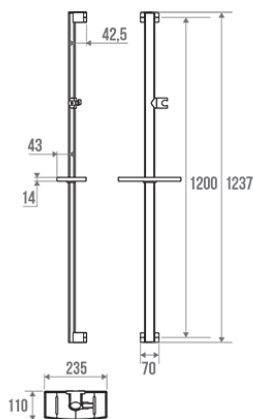

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium époxy blanc. Cache-fixations en résine de synthèse blancs.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc
Dimensions	1200 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	0.990 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
CE - Charge admissible	75 kg
Tests laboratoire à	110 kg

Garantie	10 ans
Gencod	3563390498194
Code douanier	7615200000
Notice	A04984002_IND_11
Pièces détachées	Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049008 : Cache-fixation blanc

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024