

Technische fiche



Informaties


Aanstelling	Multifunctionele toiletbeugel
Referentie	048420



De pluspunten

- + Omkeerbaar.
- + Geïntegreerde accessoires: boren is niet nodig.
- + Ideaal voor kleine ruimtes.
- + Eenvoudig te installeren: voorgeboorde spijlen.

Beschrijving

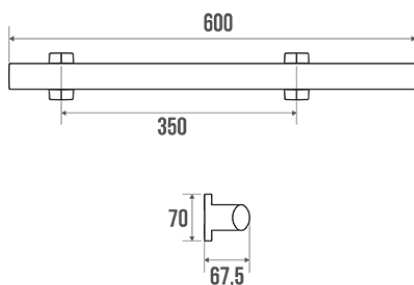

38x25 mm aluminium elliptische buis, bevestigingsdoppen van polymeer.
Onzichtbare bevestigingen.
Beschikbaar voor WC-ruimte met rolhouder.
Voorgeboorde buizen om de 50 mm voor het monteren van accessoires, afhankelijk van de gewenste hoogte en rechter- of linkerpositie (omkeerbaar).

Technische kenmerken

Afmetingen	605 x 70 x 67,5 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	0.670 kg
Verpakking	Kartonnen doos
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja

Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	0.475 kg
Gencod	3563390484203
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04841001_IND_04

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024