

## Technische fiche




### Informaties

Aanstelling	Verstelbare ERGONOMISCHE douchezitting
Referentie	047836

### De pluspunten

- + Maximale veiligheid : met automatische steunpoot.
- + Maximale Veiligheid : met automatische steunpoot.
- + p>Compact in de geheven stand.
- + Eenvoudige installatie.
- + Antiroestgarantie.

### Beschrijving

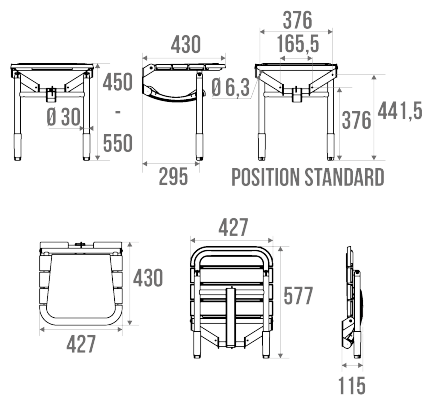

Witte polypropeen latten, Witte alu. buis Ø 25 mm

### Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Wit
Afmetingen	427 x 450 x 430 mm
Diameter Ø	25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	3.600 kg
Verpakking	Kartonnen doos + etiket
CE : toegelaten belasting	150 kg

Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	2.790
Gencod	3563390478363
Douanecode	7615200000
Infoblad	<a href="#">S00002132_IND_03</a>

## Ondehoud en installatie gids

---

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024